


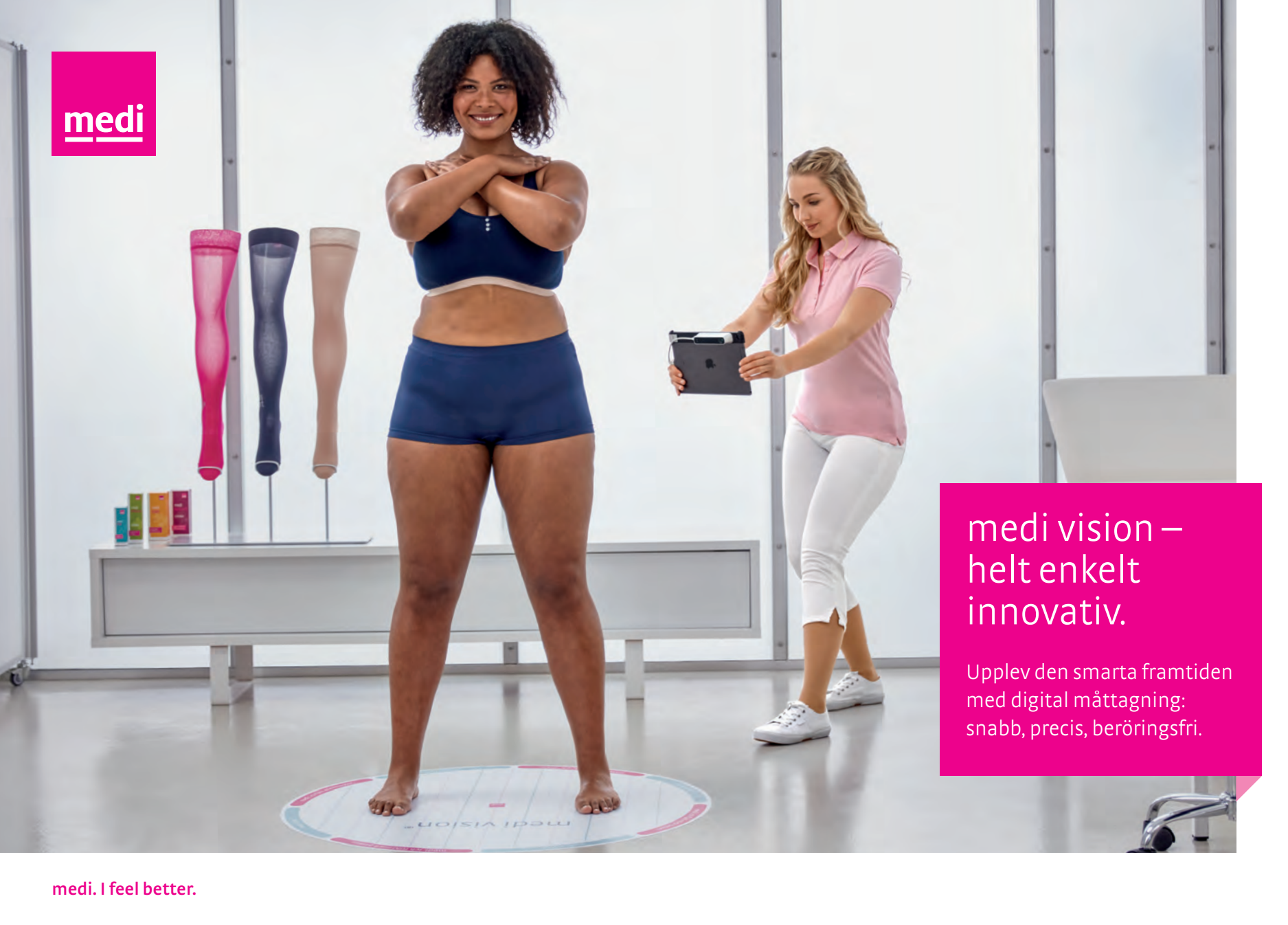

medi

medi vision –
helt enkelt
innovativ.

Upplev den smarta framtiden
med digital måttagning:
snabb, precis, beröringsfri.

medi. I feel better.



Helt enkelt innovativ: Förenkla den dagliga vårdrutinen med medi vision

Frigör tid så att du kan ägna dig mer åt att samtala med patienterna: Tack vare den snabba processen hinner du med mer under patientmötet.

Tack vare de precisa resultaten kan du förse dina patienter med kompressionsstrumpor som är anpassade till precis rätt storlek.

medi vision är en flexibel och bärbar produkt – den kan användas på vårdmottagningar, vid hembesök eller i specialistbutiker för medicintekniska produkter.

Upplev den smarta framtiden med digital måtttagning.

Framtidens digitala måttagning: snabb, precis och mobil

Skapa nya möjligheter med medi vision.



Mobil och lättanvänd:

Tack vare den kompakta storleken och att produkten tar så lite plats är det möjligt att använda medi vision på ett flexibelt sätt – på mottagnings- och vårdhem, i samband med hembesök eller i butiker för medicintekniska produkter



Snabb och effektiv:

Tack vare den tidsbesparande skanningen och digitala beställningen får du mer tid till dina patienter.



Nöjda patienter:

Med den smidiga och innovativa upplevelsen tillsammans med individanpassade kompressionsstrumpor skapar vi nöjda patienter



Precis och pålitlig:

De mått som genereras kan närmast tas fram igen och integreras direkt i beställningsprocessen. Du kan lita på oss som har genomfört många måtttagningar med lyckat resultat.*

Innovativ, snabb och digital: Vi hjälper dig med kompressionsbehandling.

Steg 1: Gör ditt val i medi e-shop

Registrera dig i medi e-shop, välj eller registrera patienten, gör de första produktinställningarna och starta medi vision.



Steg 2: Fastställ måtten

När man skannar av patienten med 3D-kameran skapas en exakt 3D-modell av benen med alla omfångs- och längdmått som behövs.



Steg 3: Kontrollera skanningen

Nu är det möjligt att kontrollera skanningen och justera måtten vid behov. Nu kan man välja och växla mellan måtten. När det gäller flatstickade produkter måste ett antal fastställda mätpunkter mätas manuellt.


Tips från medi

Det allra bästa med att ta mått till flatstickat material: den smarta algoritmen* från medi beräknar spänningsmättet automatiskt – ansökan om europeiskt patent är inlämnad.



Steg 4: Slutför beställningen

Måtten skickas över till e-shopen med bara ett klick. Välj standardstorlek eller måttillverkad produkt. medi e-shop guidar dig sedan genom resten av stegen. Skicka iväg beställningen – och sen är det klart!

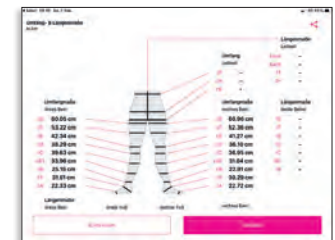

* fastställd utifrån insamlad data



En optimal process för dig, en unik upplevelse för dina patienter!

medi vision – alltid vid din sida.

Innovativ skanningsteknik som du har stor nytta av i arbetslivet: Tack vare att det är så enkelt att använda tekniken har det aldrig varit enklare att ta mått på patienten. De digitalt insamlade mätdata integreras automatiskt i medi e-shop och innebär att du inte behöver fylla i något för hand.



Bärbar och patientvänlig:

Ta hand om dina patienter även utanför din arbetsplats med medi vision. När du är klar med skanningen kan ni konfigurera produkten tillsammans och beställa direkt.

Checklista

För att kunna använda medi vision behöver du ha:

- Wifi eller möjlighet att parkoppla med en mobiltelefon
- Utrymme: ca 2,2 meter i diameter behövs vid skanning
- Ljushöghållanden: inget direkt solljus eller speglar i skanningsområdet




Beröringsfri, hygienisk, och snabb måttagning:
Smidigt för dig och en positiv upplevelse för dina patienter.



Användarvänlig och flexibel:
När du navigerar i menyn får du hjälp med att fastställa mått. Du har fortfarande möjlighet att justera dataresultaten vid behov.



Perfekt anpassad till patienten:
med medi vision får du precisa data oberoende av kroppsform eller vävnadens tillstånd.

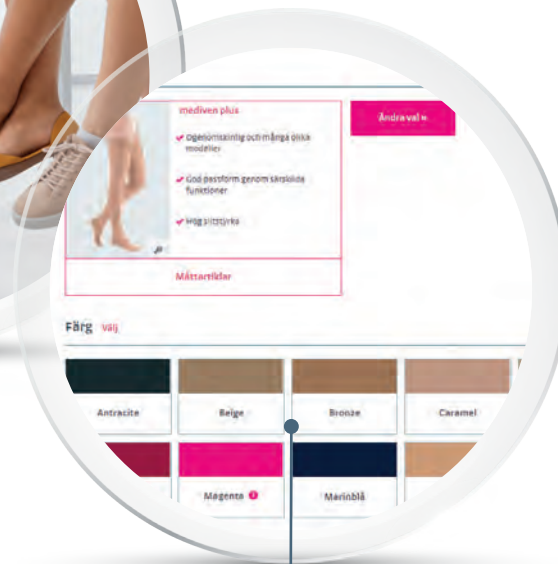

En snabb och enkel beställningsprocess:
Beställ smidigt på webben via medi e-shop – direkt efter skanningen.

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna

T 08-96 97 98
F 08-626 68 70
medivision@medi.se
www.medi.se

Huvudkontoret
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Tyskland
T +49 921 912-0
export@medi.de
www.medi.de/en

Hårdvaran är en iPad från Apple Inc. Den har utrustats med en kamera från Occipital Inc och den installerade programvaran kommer från Lymphatech Inc. för medi GmbH & Co. KG:s räkning.
Gällande garantier från Apple Inc. täcker inte ändringar som har genomförts av medi GmbH & Co. KG.

medi vision är endast framtagen för att ta mått på patienten för att tillverka medicinska kompressionsstrumpor från medi.
medi vision är inte tänkt att användas för att diagnostisera, förhindra, övervaka, prognostisera, behandla eller lindra sjukdomar.